



First Fit (تنظیم اولیه سمعک)



مرحله ۲: تایید اطلاعات مراجعه کننده




- جزئیاتی مانند سن مراجعه کننده و اطلاعات ادیوگرام (نوار گوش) را تایید کنید.
- بسته به تجربه مراجعه کننده در استفاده از سمعک، بین گزینه First Time (بار اول) و Long Term (طولانی مدت) یکی را انتخاب کنید.
- سن مراجعه کننده، تجربه استفاده از سمعک و اطلاعات شنوایی سنجی منحصر به فرد آن‌ها، همگی بر تنظیمات First Fit (تنظیم اولیه) و Automatic Adaptation Manager (مدیریت انطباق خودکار) تاثیر خواهند گذاشت.

مرحله ۳: تایید بخش آکوستیک سمعک




- اطمینان حاصل کنید که اتصال آکوستیکی (Acoustic coupling) که برای مراجعه کننده انتخاب کرده‌اید با اطلاعات درج شده در اینجا مطابقت داشته باشد.
- با کلیک کردن روی Next (بعدی)، محاسبات First Fit انجام شده و سمعک‌ها از حالت بی‌صدا (Unmuted) خارج می‌شوند.

مرحله ۱: شناسایی سمعک(ها)

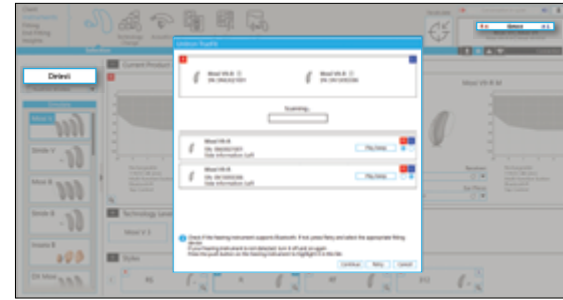

From the [Instruments > Selection](#) screen, click on [Detect](#)

- با استفاده از رابط مربوطه، سمعک(ها) را به نرم‌افزار تنظیم Unitron TrueFit™ متصل کنید.
- روی دکمه Detect (شناسایی) کلیک کنید.
- کادر باز شده نشان خواهد داد که سمعک(ها) با موفقیت شناسایی شده‌اند.

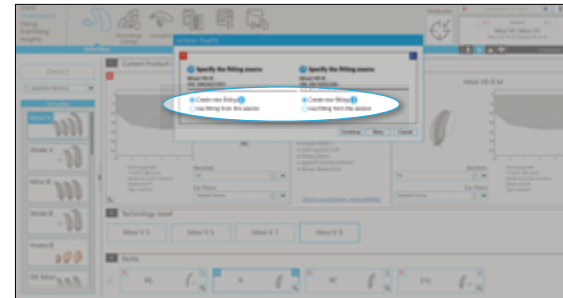

Select [Create new fitting](#)

- برای First Fit، اطمینان حاصل کنید که گزینه [Create new fitting](#) انتخاب شده باشد.



راهنمای شروع سریع بخش First Fit

تنظیمات بیشتر

پس از تکمیل First Fit، می‌توانید انتخاب کنید که جلسه را ذخیره کرده و ببندید، یا تنظیمات بیشتری انجام دهید، مانند:



- برای تنظیم دقیق سمک‌ها نسبت به تنظیمات پیش‌فرض، به مسیر **Fitting > Tuning** بروید.
- در صورت لزوم، می‌توانید از **Fitting Advice** (مشاوره تنظیم) برای پیشنهاد و اعمال تغییرات دقیق استفاده کنید.



- برای عملکردهای دکمه و کنترل ضربه‌ای (در صورت وجود)، به بخش **End Fitting** بروید.
- بوق‌ها (هشدارها) را در صفحه **End Fitting > Beeps** تنظیم کرده و به مراجع نشان دهید.

مرحله ۴: تایید تنظیمات First Fit و Automatic Adaptation Manager



- در اینجا می‌توانید فرمول تنظیمی را انتخاب کرده و تنظیمات **Automatic Adaptation Manager** را تغییر دهید.
- تست فیدبک (Feedback Test) را تنها در صورتی اجرا کنید که سمک به صورت روشن و در حال فیدبک زدن بر روی گوش بیمار باشد.

مرحله ۵: تکمیل تنظیم اولیه (First Fit)



- اگر وارد حساب کاربری **myUnitron** خود شده‌اید و گزینه **Insights** را فعال کرده‌اید، این تنظیم در نرم‌افزار تنظیمی **TrueFit** فعال می‌شود - در اینجا به شما یادآوری می‌شود که مراجعه کننده را تشویق کنید تا **Insights** را در برنامه **Remote Plus** فعال کند.
- با استفاده از میانبرهای موجود انتخاب کنید که در مرحله بعد به کجا بروید، یا اینکه جریان کاری را ببندید.

sonova • unitron • حیات
HEAR THE WORLD | مدیسا طب | یونیترون ایران

حیات مدیسا طب نماینده رسمی و انحصاری سمک‌های یونیترون (از گروه سونووا) در ایران

آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان ولیعصر، پلاک ۲۴۸۵ برج نگار، طبقه ۵، واحد ۳
کدپستی: ۱۹۶۹۸۳۳۳۸۶ | تلفن: +۹۸ ۲۱ ۹۱۰۱۳۹۱۹ | دورنگار: +۹۸ ۲۱ ۸۸۶۴۱۵۰۹

وبسایت: hayatmedisa.com | ایمیل: info@hayatmedisa.com

بات تلگرام: HayatMedisaBot | /hayatmedisa




یونیترون (Unitron) با راهکارهای شنوایی شگفت‌انگیز که برای آسان‌تر کردن تجربه‌ها طراحی شده‌اند، زندگی را سرزنده می‌سازد. زیرا همه شایسته دوست داشتن این تجربه (Love the experience.™) هستند.

© 2024 Sonova AG, or its affiliates
029-6871-48/V1.01/2024-09/jb

unitron.com/au
1800 212 313



Sonova AG,
Laubisrütistrasse
28, CH-8712 Stäfa,
Switzerland

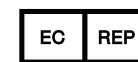

Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Str. 20
70736 Fellbach-Oeffingen,
Germany



sonova
HEAR THE WORLD